

准备:




第1步: 取出注射笔

- 在准备好注射之前, 请勿拔下笔帽。
- 如果注射笔掉落到坚硬的面或损坏, 请勿使用。
- 将注射笔置于平坦表面上, 使其在室温 (低于 25°C) 下自然升温至少45分钟。
- 请勿在微波炉、热水中加热注射笔。
- 请勿将注射笔置于阳光直射的地方加热。

第2步: 注射前准备

- 确保您有以下几件物品:
- 司普奇拜单抗预充式自动注射笔
- 1块酒精擦拭片
- 1个棉球或纱布

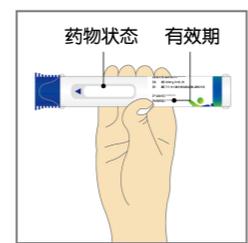


第3步: 看标签: 检查有效期限

- 确认是否为正确的产品和剂量。
- 如果有效期限已过, 请勿使用注射笔。
- 请勿将本品于室温下放置超过14天。

通过注射笔的观察窗观察药物: 检查液体是否为无色至浅黄色澄明液体。如果看到气泡, 此为正常现象。

如果液体变色或浑浊, 或含有块状物或颗粒, 请勿使用注射笔。

在针头末端或护套套上有一滴液体是正常现象。

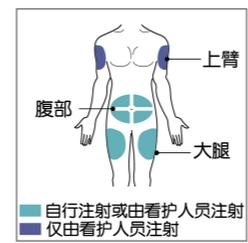

第4步: 选择注射部位


- 建议的注射部位如下:
- 大腿
- 腹部, 肚脐周围5厘米之内的区域除外。
- 上臂, 如果是看护人员给您注射, 也可以注射至上臂外侧区域。
- 建议每次注射时轮换注射部位。
- 请勿注射到脆弱、受损或有瘀伤、疤痕的皮肤上。

第5步: 清洁

- 清洗您的双手。
- 用酒精擦拭片清洁注射部位。
- 注射前让皮肤干燥。


注: 注射前请勿再次触摸注射部位或吹干注射部位。

注射:

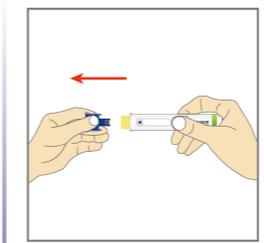


第1步: 拔笔帽

- 注射前拉拔下笔帽, 取下笔帽后立即注射药物。
- 请勿扭曲或弯曲笔帽。
- 请勿将笔帽放回预充式自动注射笔上。
- 请勿将手指放入护套套中。

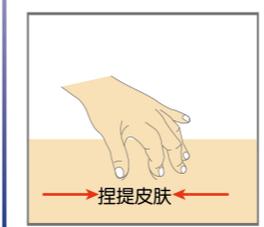

第2步: 捏提皮肤


体型消瘦者, 注射前和注射过程中捏提皮肤。

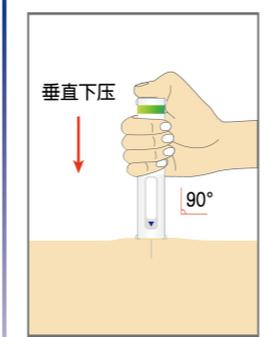

第3步: 注射

- 将黄色安全防护罩以90° 放在皮肤上, 针处于黄色安全护套针套内。
- 以握拳的方式握住注射笔。
- 将自动注射笔注射端 (黄色端) 垂直用力向下压向注射位置的皮肤。
- 听到第一次“咔哒”提示音, 窗口开始变黄, 表示注射开始。
- 听到第二次“咔哒”提示音时, 整个窗口变黄, 仍需保持按压5-10秒。
- 再将自动注射笔移开注射位置。

完成:

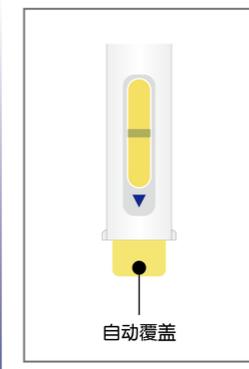

第1步: 注射完成

- 注射完毕时窗口从透明变为黄色, 并且自动注射笔离开皮肤后针头会自动覆盖于黄色安全防护罩内。
- 注:** 当取下自动注射笔时, 如果窗口尚未变黄, 或者看起来药物仍在注射, 这意味着可能未完全把药品的全剂量注射完, 遇到这种情况时请勿重复注射, 可咨询您的医护人员。
- 拔针后无需按压, 如发生漏液, 用棉签轻轻擦拭即可。
 - 如出血, 用棉球或纱布轻轻按住注射部位。请勿揉搓摩擦注射部位。

第2步: 处置

- 注射完毕后, 无需将笔帽重新盖上。
- 使用后立即将已使用的自动注射笔和蓝色针头盖丢弃于锐器处理容器中。
- 请勿将自动注射笔和蓝色笔帽丢弃 (弃置) 在您的生活垃圾中。

司普奇拜单抗注射液（康悦达®）
300mg（2ml）预充式自动注射笔

使用说明



如何存储司普奇拜单抗注射笔

- 将注射笔和所有药物置于儿童无法接触的地方。
- 将未使用的注射笔存放于原包装盒内，并在2℃-8℃条件下存放于冰箱中。
- 将注射笔置于原包装盒内，并避光储存。
- 请勿将注射笔于室温（<25℃）下保存超过14天。如果您需要从冰箱中永久取出包装盒，请在外包装盒上的空白处记录取出日期，并在14天内使用司普奇拜单抗。
- 任何时候请勿振摇注射笔。
- 请勿加热注射笔。
- 请勿冷冻注射笔。
- 请勿将注射笔置于阳光直射的地方。

重要信息

该装置为一次性使用的预充式自动注射笔，含有300 mg用于注射至皮肤下（皮下注射）的司普奇拜单抗。

- 使用注射笔之前，请仔细阅读所有使用说明。
- 咨询您的医疗卫生专业人员您需要多长时间注射一次药物。
- 每次注射选择不同的注射部位。
- 如果注射笔损坏，请勿使用注射笔。
- 如果蓝色笔帽缺失或未牢固连接，请勿使用注射笔。
- 请勿用手指按压或触碰黄色护针套。
- 请勿透过衣服注射。
- 在准备好注射前，请勿移除蓝色笔帽。
- 请勿尝试将蓝色笔帽重新盖至注射笔上。
- 请勿重复使用注射笔。
- 除非您的医疗卫生专业人员对您进行过培训，否则您不得尝试自行或给他人注射本品。